

3M Acne Patch

Instructions for Use



pl Plastry na zmiany trądzikowe. Instrukcja użytkowania.

- 1) Dokładnie oczyść i osusz skórę. Otwórz opakowanie. Usuń luźne podłoże.
- 2) Delikatnie zegnij podłoże, trzymając za czerwoną mini-zakładkę odklej plaster od podłoża.
- 3) Nałóż czerwoną mini-zakładką do skóry.
- 4) Dociśnij plaster, jednocześnie przekręć i pociągnij czerwoną mini-zakładkę by ją usunąć. Pozostałe plastry przechowuj w opakowaniu. Zmieniaj co 8 godzin lub kiedy plaster zmieni kolor na biały.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Nie stosować z terapiami ani produktami leczniczymi. Jeżeli stan Twojej skóry się pogorszy, skonsultuj się z lekarzem.

Made in South Korea

Manufactured for:



3M Company
2510 Conway Ave,
St. Paul, MN 55144, USA



3M Deutschland GmbH
Carl-Schurz-Str. 1
41453 Neuss, Germany



3M (Schweiz) GmbH
Eggstrasse 91
8803 Rueschlikon
Switzerland



3M United Kingdom PLC
3M Centre, Cain Road
Bracknell, Berkshire,
RG12 8HT.



BA-015-EMEA-Nex



BA-015-EMEA-VIS
34-2001-6879-6
0221410.1